

Draagbare Contactlens Automatische Ultrasone Reiniger





1. Bovenste deksel
2. Hoofdgedeelte
3. Oplaadpoort
4. Antislipmat
5. Bodemafvoeruitlaat



1. Make-upspiegel
2. Dubbel brilmontuur
3. Schakelaar
4. LED-scherm
5. Plaatsingssleuf voor zuigstang
6. Plaatsingssleuf voor pincet
7. Tijd

Specificaties

- Model: YQ-066
- Nominale laadspanning: 5V
- Nominale laadstroom: 1A
- Nominaal vermogen: 2W
- Gewicht: over 85g
- Maat: 100x65x36mm
- Uitvoeringsnormen: GB4706.1-2005
- Bevat: Host, pincetzuigstaaf, dubbel brilmontuur, oplaadkabel

Gebruiksaanwijzing

Glazen schoonmaken



1. Open het bovenste deksel van de reinigingsbox
2. Open het deksel van de reinigingstank en plaats de contactlens erin
3. Giet er contactlensvloeistof in

Let op: Maak bij het plaatsen onderscheid tussen links en rechts

Let op: De verzorgingsvloeistof moet in de lenzen worden ondergedompeld




4. Bedek het deksel van de reinigingstank, druk op de startknop om te starten, druk op t om de tijd aan te passen en het programma zal automatisch eindigen
5. Na het reinigen verwijdt u de dubbele reinigingsbox en haalt u de lenzen eruit
6. Giet de vloeistof weg en maak de dubbele doos schoon

De contactlensreinigingsbox stopt automatisch met werken op basis van de ingestelde tijd. Mocht er tijdens het gebruik per ongeluk water uitlopen, dan voert de onderste afvoeropening het overtollige water af.

Let op: Draai de reinigingsdeksel goed vast om lekkage te voorkomen

Machine opladen

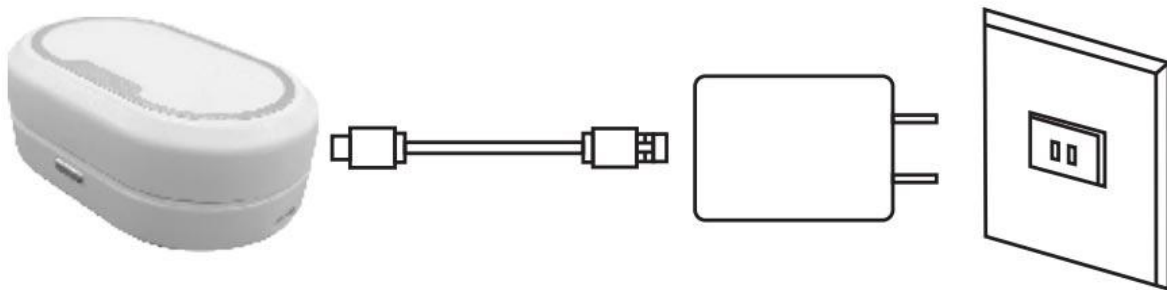

Oplaadkop

USB-kop

Adapter 5V-1A (uitbesteed)

Stopcontact

Let op: Opladen met een grote adapter kan de accu van het apparaat beschadigen. Het gebruik van een 5V/1A-laadadapter wordt aanbevolen.

Wanneer de batterij van het apparaat bijna leeg is, geeft het led-scherm LO aan. Sluit op dat moment de oplaadkabel aan en sluit de adapter aan.

Wanneer de batterij is opgeladen, geeft het scherm drie horizontale balkcycli weer in de laadstatus. Zodra het opladen is voltooid, geeft het display FU weer.